

SnareCoil[®]

Knochenmarkbiopsienadel



Mit freundlicher Unterstützung
unseres Vertriebspartners



embemed

embemed

SnareCoil® Knochenmark-Biopsienadel

Die Knochenmark-Biopsienadel von Ranfac ist ein Instrument zur Entnahme von Knochenmark beziehungsweise Blut, die die Notwendigkeit externer Nadelmanipulationen minimieren und stets hochwertige Proben sicherstellt.

Die SnareCoil® Knochenmark-Biopsienadel von Ranfac ist eine Nadel für die Entnahme von Knochenmark bzw. Blut. Mit ihrem feinen internen Schlingenmechanismus, der sich nach dem Eindringen der Nadel in das Knochenmark um die Spitze der Probe herumwickelt und sie so festhält.

Durch diesen Mechanismus braucht die Nadel für das Abtrennen und Entnehmen der Probe nach Eintritt in das Knochenmark nicht mehr nennenswert bewegt werden. Dies ist nicht nur vorteilhaft bei Patienten, bei denen einmalig eine Knochenmarkprobe für Diagnosezwecke entnommen wird, sondern vor allem auch bei Patienten mit hämatologischen malignen Erkrankungen wie Leukämie

oder Lymphomen, bei der zur Beurteilung des Behandlungserfolgs mehrere Biopsien erforderlich werden können.

Diese innovative Nadelkonstruktion besitzt eine Spitze mit patentierter* SnareCoil®-Technik. Die Einrichtung umfasst lange Probenzylinder und fixiert diese fragmentfrei. Die Spirale greift in die Gewebeprobe, trennt sie ab und hält sie beim Zurückziehen sicher in der Nadel. Dieser Vorgang wird durch einen Hebel im Instrumentengriff ausgelöst. So braucht man die Nadel nicht ruckartig zu drehen oder zu ziehen, um die Probe in der Nadel zu halten; die Biopsie vereinfacht sich dadurch entscheidend.

* Patent No. 5,522,398 & 5,634,473
NeedleVISE is a trademark of Attrion Medical Products.

EIGENSCHAFTEN

- Mit bequemem Handflächengriff, damit Anwender bei Bedarf größeren Druck ausüben können.
- Ergonomisch gestaltet, um Hand und Arm möglichst wenig zu ermüden.
- Die Trokarspitze der Nadel ermöglicht eine einfache Penetration des Kortex.
- Markierung zeigt Retention der Probe an.
- ISO-Luer-Slip im Handgriff.
- Positionen »OFFEN« und »GESCHLOSSEN« (open und closed).
- Kanüle mit Twin-Peaks-Funktion sichert optimale Stanzposition zur Überprüfung der Spirale.
- Die Tip Probe Guide-Führung erleichtert die Platzierung der Sonde zur Probennahme.
- Ein Nadelschutz ist bei jeder Nadel dabei.
- 1-Port-NeedleVISE™ wird ebenfalls mitgeliefert – sichert die Nadel nach Gebrauch und vor der Entsorgung.



BESTELLUNG

BESTELLNUMMER	GRÖSSE	PRO PACKUNG
RBN-84	8G x 4 inch (10 cm)	10 Stück
RBN-86	8G x 6 inch (15 cm)	10 Stück
RBN-114	11G x 4 inch (10 cm)	10 Stück
RBN-116	11G x 6 inch (15 cm)	10 Stück
RBN-133	13G x 3 inch (8 cm)	10 Stück

**WIR NEHMEN IHRE
BESTELLUNG GERNE ENTGEGEN.**

embemed Bleckmann
Medicalprodukte GmbH
Telefon: +49 40 85150388-0
bestellung@embemed.de
www.embemed.de
shop.embemed.de