

BIOSOFT™

BIOPSIEINSTRUMENT

BIOSOFT™ ist ein Einweg-Biopsieinstrument mit integrierter automatischer Aspiration zur Gewinnung umfangreicher histologischer Biopsien.

ANWENDUNG

- Spannen Sie die Kanüle, indem Sie den Kolben drücken, bis der vordere Auslöser einrastet.
- Führen Sie die Kanülenspitze unter Ultraschallkontrolle in den gewünschten Biopsiebereich ein.
- Drücken Sie den Auslöser, um die automatische Aspiration zu starten. Schieben Sie die Kanüle anschließend etwa 2 cm vor, um die Probe zu gewinnen.
- Ziehen Sie die Kanüle danach langsam zurück.
- Um die Probe aus der Kanülenspitze zu entnehmen, laden Sie das Gerät erneut, indem Sie den hinteren Kolben drücken, und übertragen Sie die Probe auf einen Objektträger.

MERKMALE

- Zentimeter-Markierung
- Einhändige Bedienung
- Geschwindigkeit und Präzision
- Schiebestopper zur Einstellung der Eindringtiefe.
- Scharfe Spitze für leichteres und schonenderes Eindringen



Artikelnr.	Durchmesser (G)	Nadelgröße	Verpackungseinheit
BSF1610C	16	16G x 10 cm	10 Stück
BSF1710C	17	17G x 10 cm	10 Stück
BSF1810C	18	18G x 10 cm	10 Stück