

SnareCoil®

Knochenmarkbiopsienadel




BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	VE IN ST.
Knochenmarkbiopsienadel 8G x 10 cm, Snarecoil	RBN-84	10 Stück
Knochenmarkbiopsienadel 8G x 15 cm, Snarecoil	RBN-86	10 Stück
Knochenmarkbiopsienadel 11G x 10 cm, Snarecoil	RBN-114	10 Stück
Knochenmarkbiopsienadel 11G x 15 cm, Snarecoil	RBN-116	10 Stück
Knochenmarkbiopsienadel 13G x 8 cm, Snarecoil	RBN-133	10 Stück

embemed

embemed Bleckmann Medicalprodukte GmbH · Marlowring 4 · 22525 Hamburg
Telefon: +49 40 85150388-0 · bestellung@embemed.de · www.embemed.de · shop.embemed.de

SnareCoil®

Vorgehensweise Knochenmarksbiopsienadel

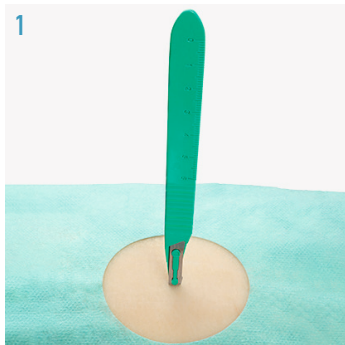

1
Die Haut für einen sterilen Eingriff vorbereiten. Mit einem Skalpell eine kleine Hautinzision vornehmen, damit die Nadel die Haut leichter durchdringen kann.

2
Mit festem Griff die Nadel senkrecht durch die Haut einführen. Unter sanftem, aber festem Druck die Nadel unter abwechselndem Drehen nach rechts und nach links bis zur Markhöhle vorschieben. Wenn der Widerstand geringer wird, zeigt dies an, dass die Markhöhle erreicht ist.

3
Das Trokarstilet lösen. Hierzu die Kappe am Griff um 90 Grad drehen und dann das Stilet gerade herausziehen.

4
Jetzt kann (falls gewünscht) aspiriert werden. Hierzu eine Luer-Lock-Spritze in der Mitte des Handgriffs anschließen, dort, wo die Kappe herausgezogen wurde.

5
Nach dem Aspirieren die Nadel, wieder unter abwechselndem Drehen nach rechts und nach links, um weitere 2–3 cm vorschieben. Dabei kann man auch die Nadelrichtung korrigieren. Falls es zu Blutungen kommt, die rote Kunststoffkappe auf den Handgriff aufsetzen.

6
Den blauen Messstab in die Nadel einführen, um zu prüfen, ob die Nadel Probenmaterial enthält. Die Markierungen auf dem Messstab zeigen an, wie lang die Biopsie ist. Den Messstab wieder herausziehen.

7
Den grauen Hebel am Griff von OPEN auf CLOSED umlegen, bis er einrastet. Hierdurch wird der SnareCoil™-Mechanismus aktiviert und die Biopsie in ihrer Position fixiert.

8
Die Nadel einmal um 360 Grad drehen. Hierdurch wird die Biopsie freigegeben. Anschließend die Nadel langsam und vorsichtig unter abwechselndem Drehen nach rechts und nach links herausziehen.

9
Den grauen Hebel am Griff von CLOSED auf OPEN umlegen, um den SnareCoil™-Mechanismus zu entsperren.

9a
Die grüne Kunststoffführung auf das distale Ende der Nadel aufsetzen.

9b
Mit dem blauen Messstab vom distalen Ende her die Probe vorsichtig aus der Nadel herausschieben. Die Probe tritt dabei am Handgriffende (also am proximalen Ende) aus.